



INSTRUÇÃO DE USO CILINDRO DO MUNHÃO UNIVERSAL PROVISÓRIO

O componente protético Cilindro do Munhão Universal Provisório destina-se a procedimento especializado que deve ser realizado exclusivamente por profissionais habilitados. A escolha inadequada dos componentes protéticos, bem como o uso sem conhecimento dos procedimentos apropriados e/ou condições inadequadas, poderá causar resultados indesejáveis no procedimento protético.

INDICAÇÃO DE USO

O Cilindro Provisório é fabricado em polímero, indicado para confecção de próteses provisórias. Tem formato cilindro e em uma das extremidades possui encaixe para a instalação sobre o Munhão Universal. Possui no corpo retenções para realização da cimentação. Os Cilindros do Munhão Universal Provisório estão disponíveis em quatro medidas, conforme tabela abaixo, que devem ser utilizadas de acordo com a altura e o diâmetro do Munhão Universal selecionado.

| TRANSFER DO MUNHAO UNIVERSAL | |
|------------------------------|---------|
| Ø 3.3x4 | Ø 3.3x6 |
| Ø 4.5x4 | Ø 4.5x6 |

CONTRA INDICAÇÕES

Deve-se estar atento em casos de pacientes que apresentem sinais de alergia ou hipersensibilidade aos componentes químicos do material: polímero. Contraindicado para espaço interoclusal insuficiente e posição tridimensional do Implante insatisfatória.

REAÇÕES ADVERSAS

Não ocorrem efeitos adversos, desde que as indicações destes produtos sejam respeitadas.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Este produto é acondicionado em embalagem tipo envelope papel grau cirúrgico e embalagem secundária cartonada. Fornecido unitariamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESCRIÇÕES DOS TRANSFER

Este produto é fabricado em poliacetal, não estéril e uso único. Fornecidos para técnica de dentes provisórios, para Munhões Universais:

Altura do Transmucoso: 4 e 6mm

Diâmetro: Ø3.3 e Ø4.5mm

MANUSEIO

A escolha do modelo de Cilindro a ser utilizado na prótese é definida de acordo com o Munhão Universal planejado pelo cirurgião dentista. Considerar o diâmetro definido e a altura cimentável do Munhão. Os Cilindros do Munhão Universal Provisório Master estarão fixados após um "clac". Em relação ao manuseio posicione o Cilindro Provisório sobre o Análogo no modelo de trabalho para acrilização indireta. Na acrilização direta o cilindro provisório deverá ser posicionado diretamente sobre o componente protético. A técnica de confecção indireta ainda pode passar pela etapa de enceramento antes da acrilização. Proteja o acesso do parafuso durante o processo de cimentação, se aplicável.

ESTERILIZAÇÃO

Os Cilindros do Munhão Universal Provisório são fornecidos "Não estéreis" deveram ser esterilizados por método de vapor úmido (autoclavagem), à temperatura de 120°C sob pressão de 1atm por 30 minutos, antes de sua inserção na cavidade bucal. A embalagem é recomendada para a esterilização em autoclave. A cadeia asséptica dos procedimentos deve ser observada durante toda a execução do caso. Recomenda-se seguir o método de esterilização por autoclave a vapor conforme os parâmetros e procedimentos estabelecidos na norma ABNT NBR 17665-1 Esterilização de Produtos para Saúde – Vapor, ou que se proceda conforme manual de instruções do fabricante do aparelho autoclave.

PRECAUÇÕES e ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o produto que apresente a embalagem danificada, violada.

Deverá ser utilizado somente por profissionais adequadamente habilitados em implantodontia e/ou prótese.

O uso do produto sem conhecimento das técnicas e/ou procedimentos e condições inadequadas, poderá gerar resultados não satisfatórios.

Não ocorrem efeitos adversos, desde que as indicações destes produtos sejam respeitadas.

Os Cilindros Provisórios são fornecidos não-estéreis e devem ser esterilizados antes da sua utilização. Produto "Proibido Reprocessar", se aberto da embalagem, esterilizar e não utiliza-lo no procedimento deve ser descartado.

O Cilindro Provisório deve ser utilizado em próteses paralelas, sem angulação. Devem ser realizados provas e testes de passividade e adaptação da prótese

Proteja o acesso do parafuso durante o processo de cimentação, se aplicável.

ARMAZENAMENTO

Os Cilindros do Munhão Universal Provisório devem ser armazenados em ambiente limpo, seco, protegido da ação do sol em temperatura máxima de 40°C.

DESCARTE DE MATERIAIS

Todos os materiais de consumo utilizados na cirurgia poderão apresentar riscos à saúde de quem os manuseia. Antes de serem descartados ao meio ambiente, recomenda-se consultar e cumprir a legislação vigente.

PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade deste produto é indicado no rótulo.

TRANSPORTE

A embalagem protege contra quedas e colisões, porém para transportes a distâncias deve estar protegidos por uma embalagem adicional.



INSTRUÇÃO DE USO CILINDRO DO MUNHÃO UNIVERSAL PROVISÓRIO

FABRICANTE:

TiBioTech Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda ME.

Rua: Lindolfo de Freitas Ledoux, 6900

Bairro: Vila da Glória São Francisco do Sul – SC

CEP: 89240-000

CNPJ: 29.134.280/0001-02

SAC: (47) 99205 - 1883

Responsável Técnico: Carlos Antonio Brusamolin CRF SC: 7703

Registro na Anvisa: 81725509002

Instrução de Uso: Cilindro do Munhão Universal Provisório rev.01

SIMBOLOGIA – REF. ABNT NBR 15223-1

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Data de validade | Mantenha afastado da luz solar | Código de lote/ Número de lote |
|  |  |  |
| Número de Catálogo | Limite superior de temperatura | Consultar as instruções de utilização eletrônicas |
|  |  |  |
| Manter seco | Não utilizar caso a embalagem esteja danificada | Não reutilizar |
|  |  |  |
| Material de fabricação do produto | Fabricante | Não estéril |
|  |  | |
| Data de fabricação | Proibido reprocessar | |