



INSTRUÇÃO DE USO TRANSFER DO MUNHÃO UNIVERSAL

O componente protético Transfer do Munhão Universal destina-se a procedimento especializado que deve ser realizado exclusivamente por profissionais habilitados. A escolha inadequada dos componentes protéticos, bem como o uso sem conhecimento dos procedimentos apropriados e/ou condições inadequadas, poderá causar resultados indesejáveis no procedimento protético.

INDICAÇÃO DE USO

Transfer é um Componente Protético fabricado em polímero com função específica de transferência (moldagem) sobre o Munhão Universal. É indicado para técnica de moldeira fechada. O Transfers do Munhão Universal está disponível em quatro medidas, conforme tabela abaixo, que devem ser utilizadas de acordo com a altura e o diâmetro do Munhão Universal selecionado.

TRANSFER DO MUNHAO UNIVERSAL	
Ø 3.3x4	Ø 3.3x6
Ø 4.5x4	Ø 4.5x6

CONTRA INDICAÇÕES

Deve-se estar atento em casos de pacientes que apresentem sinais de alergia ou hipersensibilidade aos componentes químicos do material: polímero. Contraindicado para espaço interoclusal insuficiente e posição tridimensional do Implante insatisfatória.

REAÇÕES ADVERSAS

Não ocorrem efeitos adversos, desde que as indicações destes produtos sejam respeitadas.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Este produto é acondicionado em embalagem tipo envelope papel grau cirúrgico e embalagem secundária cartonada. Fornecido unitariamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESCRIÇÕES DOS TRANSFER

Este produto é fabricado em poliacetal, não estéril e uso único. Fornecidos na técnica de Moldeira Fechada, para Munhões Universais:

Altura do Transmucoso: 4 e 6mm

Diâmetro: Ø3.3 e Ø4.5mm

MANUSEIO

Para o procedimento de moldagem, encaixe o Transfer do Munhão Universal correspondente, certifique-se do encaixe através de um "clique" e realize a moldagem com a técnica fechada utilizando materiais adequados. Retire o molde com o Transfer do Munhão Universal e encaixe o Análogo do Munhão Universal sobre o Transfer do Munhão Universal. Confeccione o modelo gesso.

ESTERILIZAÇÃO

Os Transfers do Munhão Universal são fornecidos "Não estéreis" deveram ser esterilizados por método de vapor úmido (autoclavagem), à temperatura de 120°C sob pressão de 1atm por 30 minutos, antes de sua inserção na cavidade bucal. A embalagem é recomendada para a esterilização em autoclave. A cadeia asséptica dos procedimentos deve ser observada durante toda a execução do caso. Recomenda-se seguir o método de esterilização por autoclave a vapor conforme os parâmetros e procedimentos estabelecidos na norma ABNT NBR 17665-1 Esterilização de Produtos para Saúde – Vapor, ou que se proceda conforme manual de instruções do fabricante do aparelho autoclave.

PRECAUÇÕES e ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o produto que apresente a embalagem danificada, violada.

Deverá ser utilizado somente por profissionais adequadamente habilitados em implantodontia e/ou prótese.

O uso do produto sem conhecimento das técnicas e/ou procedimentos e condições inadequadas, poderá gerar resultados não satisfatórios.

Não ocorrem efeitos adversos, desde que as indicações destes produtos sejam respeitadas.

Os Transfers são fornecidos não-estéreis e devem ser esterilizados antes da sua utilização. Produto "Proibido Reprocessar", se aberto da embalagem, esterilizar e não utiliza-lo no procedimento deve ser descartado.

ARMAZENAMENTO

Os Transfer do Munhão Universal devem ser armazenados em ambiente limpo, seco, protegido da ação do sol em temperatura máxima de 40°C.

DESCARTE DE MATERIAIS

Todos os materiais de consumo utilizados na cirurgia poderão apresentar riscos à saúde de quem os manuseia. Antes de serem descartados ao meio ambiente, recomenda-se consultar e cumprir a legislação vigente.

PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade deste produto é indicado no rótulo.

TRANSPORTE

A embalagem protege contra quedas e colisões, porém para transportes a distâncias deve estar protegidos por uma embalagem adicional.



INSTRUÇÃO DE USO TRANSFER DO MUNHÃO UNIVERSAL

FABRICANTE:

TiBioTech Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda ME.

Rua: Lindolfo de Freitas Ledoux, 6900

Bairro: Vila da Gloria São Francisco do Sul – SC

CEP: 89240-000

CNPJ: 29.134.280/0001-02

SAC: (47) 99205 - 1883

Responsável Técnico: Carlos Antonio Brusamolin CRF SC: 7703

Registro na Anvisa: 81725500004

Instrução de Uso: Transfer do Munhão Universal
rev.02

SIMBOLOGIA – REF. ABNT NBR 15223-1

		
Data de validade	Mantenha afastado da luz solar	Código de lote/ Número de lote
		
Número de Catálogo	Limite superior de temperatura	Consultar as instruções de utilização eletrônicas
		
Manter seco	Não utilizar caso a embalagem esteja danificada	Não reutilizar
		
Material de fabricação do produto	Fabricante	Não estéril
		
Data de fabricação	Proibido reprocessar	