



INSTRUÇÕES DE USO MEDIDOR PROTÉTICO

O Medidor de altura destina-se a procedimento especializado que deve ser realizado exclusivamente por profissionais habilitados. A escolha inadequada dos instrumentais, bem como o uso sem conhecimento dos procedimentos apropriados e/ou condições inadequadas, poderá causar resultados indesejáveis no procedimento protético.

INDICAÇÃO DE USO

Este produto é um instrumental indicado para uso em cirurgias odontológicas, destinado à seleção da altura da mucosa e do ângulo de inclinação dos Componentes Protéticos a serem instalados sobre implantes com interfaces Master, Cone Morse (CM) e Hexágono Externo (HE). A seleção da altura da mucosa é realizada por meio das marcações graduadas presentes no corpo do medidor, permitindo a seleção do componente protético adequado.

Recomenda-se verificar previamente a compatibilidade entre as interfaces protéticas selecionadas.

CONTRA INDICAÇÕES

Os Medidores de altura não apresentam contraindicações quando utilizados para a finalidade a que se destinam, seguindo suas instruções de uso.

REAÇÕES ADVERSAS

Não ocorrem efeitos adversos, desde que as indicações destes produtos sejam respeitadas.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Este produto é acondicionado em embalagem tipo envelope. Fornecido unitariamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESCRIÇÕES DO MEDIDOR

Este produto é fabricado em Titânio conforme norma ASTM F367, não estéril e reutilizável.

MANUSEIO

Antes da utilização, recomenda-se fixar um fio de segurança no orifício do instrumento, a fim de evitar deslocamentos e reduzir o risco de deglutição ou aspiração pelo paciente.

Inserir o Medidor Protético compatível com a plataforma protética do implante, acoplado sua região cônica ao cone interno do implante, para realizar a verificação da altura da mucosa e, assim, selecionar a altura adequada dos componentes transmucosos a serem utilizados.

Quando utilizado como posicionador radiográfico, após a inserção do Medidor no implante, realizar a radiografia pela técnica do paralelismo, avaliando a relação da crista óssea com as marcações (canais) do Medidor Protético.

HIGIENIZAÇÃO

Deve ser higienizado após cada utilização, seguir o passo a passo recomendado abaixo.

Realizar a limpeza utilizando detergente enzimático na concentração de 10%, imergindo completamente o produto na solução.

Quando disponível, realizar a limpeza em lavadora ultrassônica por 10 (dez) minutos ou utilizar programa apropriado para instrumentais, assegurando que o ciclo contenha parâmetros e informações de lavagem suficientes;

Não utilizar escovas metálicas ou lâ de aço em nenhuma etapa do processo de limpeza;

Enxaguar os instrumentais com água destilada, utilizando escova adequada, garantindo a remoção total de resíduos;

Após a limpeza e pós-desinfecção, inspecionar todos os instrumentais quanto à presença de corrosão, superfícies danificadas ou impurezas. Não utilizar dispositivos danificados. Instrumentais que apresentarem contaminação residual devem ser limpos e desinfetados novamente;

Realizar a secagem completa com pano limpo e seco (que não solte filamentos). A secagem adequada é de extrema importância antes do armazenamento e da esterilização, uma vez que o acúmulo de umidade pode ser prejudicial ao produto e ocasionar oxidação;

Caso a higienização não apresente resultado satisfatório, repetir todo o processo até que as condições adequadas de limpeza sejam alcançadas;

Selecionar a embalagem compatível com o método de esterilização, preferencialmente filmes e papel grau cirúrgico, garantindo proteção adequada até o momento do uso.

ESTERILIZAÇÃO

Os Medidores de Altura são fornecidos "Não estéreis" deveram ser esterilizados por método de vapor úmido (autoclavagem), à temperatura de 120°C sob pressão de 1atm por 30 minutos, antes de sua inserção na cavidade bucal. Abrir a embalagem de forma asséptica sacar o Medidor e esterilizar em autoclave. A embalagem comercializada, não é recomendada para a esterilização em autoclave. A cadeia asséptica dos procedimentos deve ser observada durante toda a execução do caso. Recomenda-se seguir o método de esterilização por autoclave a vapor conforme os parâmetros e procedimentos estabelecidos na norma ABNT NBR 17665-1 Esterilização de Produtos para Saúde – Vapor, ou que se proceda conforme manual de instruções do fabricante do aparelho autoclave.

PRECAUÇÕES e ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o produto que apresente a embalagem danificada, violada. Não Utilizar a embalagem original para esterilização, deve-se autoclavar em embalagem envelope papel grau cirúrgico.

Deverá ser utilizado somente por profissionais adequadamente habilitados em implantodontia e/ou prótese.

O uso do produto sem conhecimento das técnicas e/ou procedimentos e condições inadequadas, poderá gerar resultados não satisfatórios.

Não ocorrem efeitos adversos, desde que as indicações destes produtos sejam respeitadas.

Os Medidores são fornecidos não-estéreis e devem ser esterilizados antes da sua utilização.

ARMAZENAMENTO

Os Medidores devem ser armazenados em ambiente limpo, seco, protegido da ação do sol em temperatura máxima de 40°C, e afastados de produtos químicos voláteis para evitar corrosão.

DESCARTE DE MATERIAIS

Todos os materiais de consumo utilizados na cirurgia poderão apresentar riscos à saúde de quem os manuseia. Antes de serem descartados ao meio ambiente, recomenda-se consultar e cumprir a legislação vigente.



INSTRUÇÕES DE USO MEDIDOR PROTÉTICO

PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade deste produto é indicado no rótulo.

TRANSPORTE

A embalagem protege contra quedas e colisões, porém para transportes a distâncias deve estar protegida por uma embalagem adicional.

FABRICANTE:

TiBioTech Indústria e Comércio de Produtos
Odontológicos Ltda ME.

Rua: Lindolfo de Freitas Ledoux, 6900

Bairro: Vila da Gloria São Francisco do Sul – SC

CEP: 89240-000

CNPJ: 29.134.280/0001-02

SAC: (47) 99205 - 1883

Responsável Técnico: Carlos Antonio Brusamolin CRF

SC: 7703

Registro na Anvisa: 81725500008

Instrução de Uso: Medidor rev.00

SIMBOLOGIA – REF. ABNT NBR 15223-1

		
Data de validade	Mantenha afastado da luz solar	Código de lote/ Número de lote
		
Número de Catálogo	Límite superior de temperatura	Consultar as instruções de utilização eletrônicas
		
Manter seco	Não utilizar caso a embalagem esteja danificada	Data de fabricação
		
Material de fabricação do produto	Fabricante	Não estéril